



CHROMAVIT

Tauchhärter für Modellgußeinbettmassen bei Gel-Dublierung (z.B. Chromogel)

Verarbeitungshinweis: Chromavit soll bei Zimmertemperatur verarbeitet werden. (18°C-25°C)
Chromavit in einem geeigneten verschließbaren Behälter füllen.

Trocknen der Modelle: bei 200°C bis-220°C ca. 45 min.

Härten der Modelle: 1 x 5 sek. oder 2 x 3 sek.

Wichtig: Das in Chromavit getauchte Modell, darf danach in gar keinem Fall, in den Ofen zurückgestellt werden.

Enthält / Contains: Ethanol (75-80%)

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
May cause an allergic skin reaction.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Highly flammable liquid and vapour.

H315 Verursacht Hautreizungen. Causes skin irritation.

H335 Kann die Atemwege reizen. May cause respiratory irritation.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking.

Behälter und zu befüllende Anlage erden. Ground/bond container and receiving equipment.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Take precautionary measures against static discharge.

Einatmen von Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.


Bei Brand: alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. In case of fire: Use for extinction, foam, carbon dioxide.

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Use: by Roomtemp. 18-26°C, fill mercapor in suitable receptacle. Dry models in the furnace of 200-220°C approx. 45 minutes, dip the hot model 1x 5 sec.
Do not give, dipping models back in furnace ... ! keep away mercapor of fire and sources of ignition !

Inhalt: e 1 Liter

REF 000 914

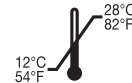

LOT



Gefahr/Danger

UN 1170

Stand:060717

M+W Dental

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88