




Nr. 10001 Gipsabscheider / Plaster separator




BDT GmbH
 Industriestr. 27 Tel. 0781/58688
 77656 Offenburg Fax. 0781/58664

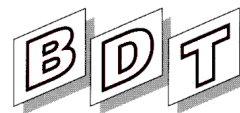

Internet: <http://www.BDT-Dental.de>
 E-Mail: info@bdt-dental.de

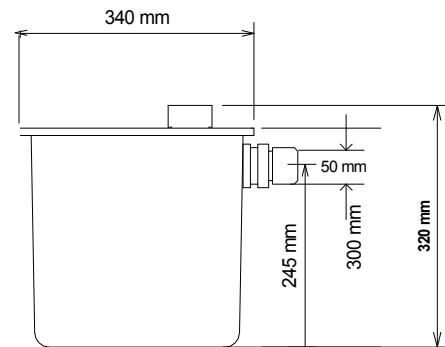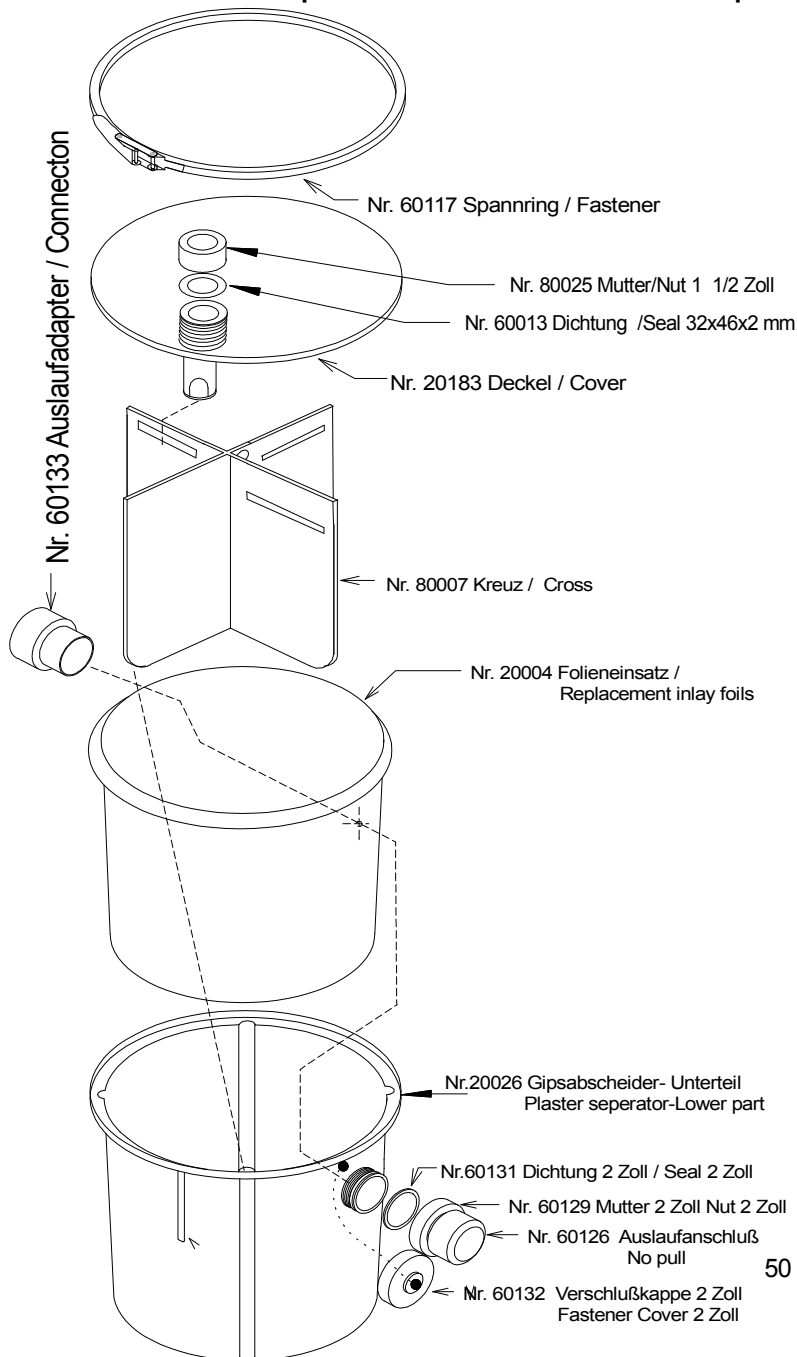


Hinweis:
 Der Ablauf des Gipsabscheiders muss höher liegen als der Wandeinlauf

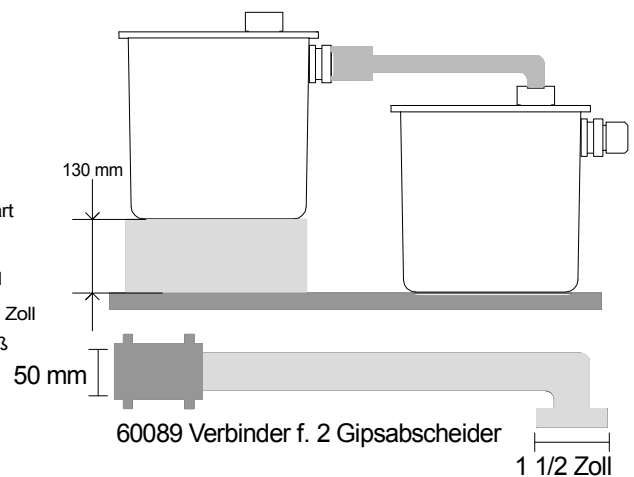




Zubehör:





70073 Zulaufschlauch-gerade

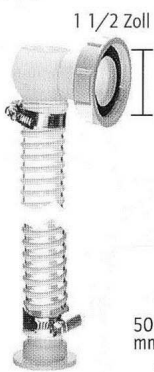

70074 Zulaufschlauch 90°

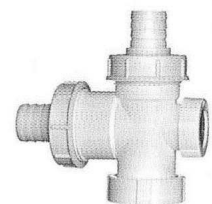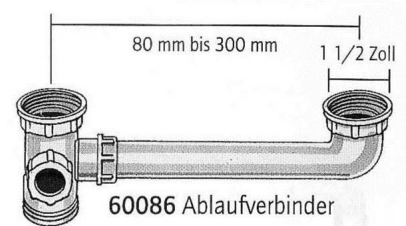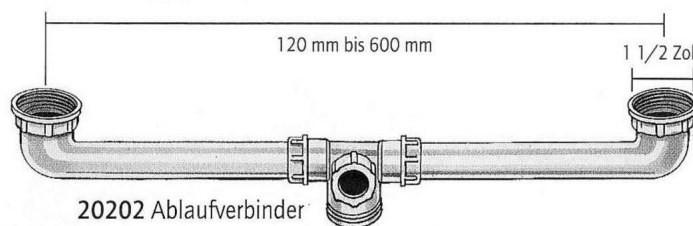

90027 T-Stück für doppelten Wasserzulauf

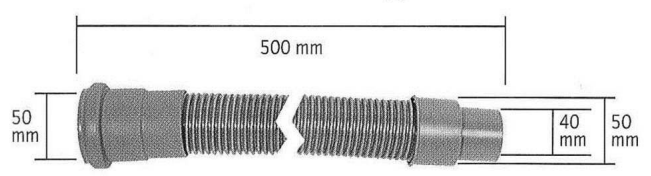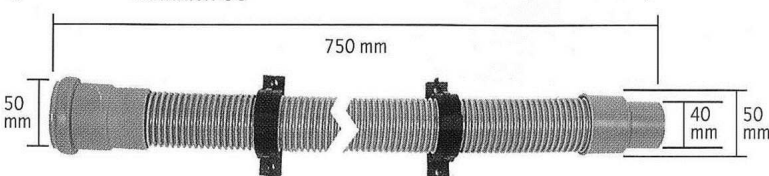

Installation des Gipsabscheiders

1. Entfernen Sie den Siphon des Ausgussbeckens und die dazugehörigen Abwasserleitungen
2. Stellen Sie den Gipsabscheider in der gewünschten Position auf. Dabei muss der seitliche Ablauf des Gipsabscheiders höher als die sich in der Wand befindlich Ablaufleitung sein. Das optimale Gefälle sollte zwischen 1-2 cm pro Meter betragen.
3. Montieren Sie den Zulaufschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) am Ausgussbecken.
4. Kurzen Sie den Zulaufschlauch auf die passende Länge, damit dieser optimal auf den sich am Deckel befindliche Anschluss montiert werden kann. Achten Sie darauf, dass am Zulaufschlauch keinen Bogen nach Oben entsteht.
5. Montieren Sie an der seitlichen Öffnung der Ablaufschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden diesen mit Ihrer Abwasserleitung. Dabei sollte das Gefälle 1-2 cm pro Meter betragen. Damit am Abwasserschlauch keinen Bogen entsteht können die mitgelieferten Schellen benutzt werden.