

ProfiGuard, Prophylaxepaste RDA250

Anwendungsbereich

Prophylaxepaste zur schonenden Entfernung von Plaque und Verfärbungen von natürlichen Zähnen und Füllungen.

Anwendung

Nach der Zahnsteinentfernung ProfiGuard in ein Dappenglas oder ein vergleichbar geeignetes Behältnis geben. Eine kleine Menge Paste dann mit dem Gummikelch oder der Polierbürste aufnehmen und in das Arbeitsgebiet einbringen. Darauf achten, dass das Winkelstück erst in Gang gesetzt wird, wenn der Polierer die Zahnoberfläche berührt. Mit langsamen Umdrehungen und wenig Druck den Polierer über die Zahnoberfläche und unter den losen Zahnfleischsaum führen. Die Behandlung mit frischer Paste wiederholen, bis alle Zahnoberflächen sorgfältig gereinigt und poliert sind. Mit Becht-Zahnseide überschüssige Paste in die Approximalräume bringen. Danach gründlich ausspülen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- Reinigung von Zahnoberflächen bei Verfärbungen oder Verunreinigungen
- Natriumfluorid unterstützt die Remineralisierung und beugt Entzündungen des Zahnfleisches vor
- Minz-Geschmack
- RDA 250
- vegan, lactosefrei
- gluten- und phthalatfrei
- grob



Zusammensetzung

- Bimsstein,
- amorphes Siliciumdioxid,
- Glycerin,
- Parabene,
- Natriumfluorid (0,2%),
- Aroma- und Farbstoffe

Haltbarkeit

54 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, Regel 5,

Lieferform

REF 480 Tube mit 95 g

Zubehör

Kelchbürsten, 4 mm, montiert für Winkelstück

REF 260.21 weiß, mit Naturborsten

REF 260.2N weiß, mit Nylonbesatz, weiß

REF 260.240N blau, mit Nylonbesatz

REF 260.250N pink soft, mit Nylonbesatz

REF 260.260N weiß soft, mit Nylonbesatz



Prophylaxepolierer, latexfrei

REF 200.1, 200.2, 200.3 zum Aufschrauben

REF 202.1, 202.2, 202.3 zum Aufstecken

REF 204.1, 204.2, 204.3 montiert für Winkelstück



Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de