

Löffeladhäsiv für A-Silikone



Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehene Anwender

Zahnarzt/-ärztin

1. Anwendung

Einen geeigneten Abformlöffel auswählen (individueller oder konfektionierter Löffel aus Metall, Hartplastik); diesen nach Anprobe im Patientenmund sorgfältig entfetten und reinigen (z.B. mit Isopropanol). Darauf achten, dass der Abformlöffel sauber, fettfrei und trocken ist. **trayloc® A dünn** auftragen oder besprühen und ca. 3 Min. trocknen lassen. Anschließend das Abformmaterial auf den Löffel aufbringen.

2. Löffelreinigung

Abgebundenes Abformmaterial mechanisch mit einem stumpfen Instrument / Spatel grob entfernen. Das restliche Material kann durch kurzes Einwirkenlassen von Aceton oder Isopropanol gut vom Löffel entfernt werden. Anschließend Löffel wie üblich reinigen und desinfizieren.

Sicherheitshinweise

- Nur für die angegebene Zweckbestimmung durch geschultes Fachpersonal.
- Augen- und Hautkontakt vermeiden! Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit reichlich Wasser abspülen.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Gefahren- und Sicherheitshinweise aus dem entsprechendem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Hinweise

- DETAX haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung hervorgerufen werden.
- Nach Gebrauch Flasche sofort wieder verschließen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für Anwender und/oder Patienten:

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich unter incident@detax.de sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Kontraindikation

Das Material nicht bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe oder bei Kontaktallergien verwenden. Unerwünschte Wirkungen sind bei sachgerechter Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen z.B. Allergien, Irritationen können jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im Zweifelsfall empfehlen wir, vor der Anwendung einen Allergietest durchzuführen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen und internationalen Vorschriften durchführen.

Symbolerläuterung

MD Medizinprodukt

Zweckbestimmung:

Löffeladhäsiv für die zahnärztliche Abformung

Indikation:

Haftvermittler zwischen Abformlöffel und A-Silikonabformmassen

Technische Daten:

- **Volumen:**
17 ml (Pinselflasche)
15 ml (Sprayflasche)
- **Produktfarbe:**
blau-transparent
- **Trocknungszeit:**
ca. 3 Min.*
- **Lagerung:**



* Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern das Trocknen.

Bestellinformation:

trayloc® A

17 ml Pinselflasche **03098**
15 ml Sprayflasche **03392**

Inlay-Löffel

12 x groß **02042**
12 x klein **02043**
6 x sortiert **02044**

Löffeladhäsive für C-Silikone:

sili Haftlack **02051**
250 ml Spraydose

sili fluid **02053**
25 ml Pinselflasche

Made in Germany



03/2020

3