
$Meliseptol^{\circ}$

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel ohne Zusatzwirkstoffe

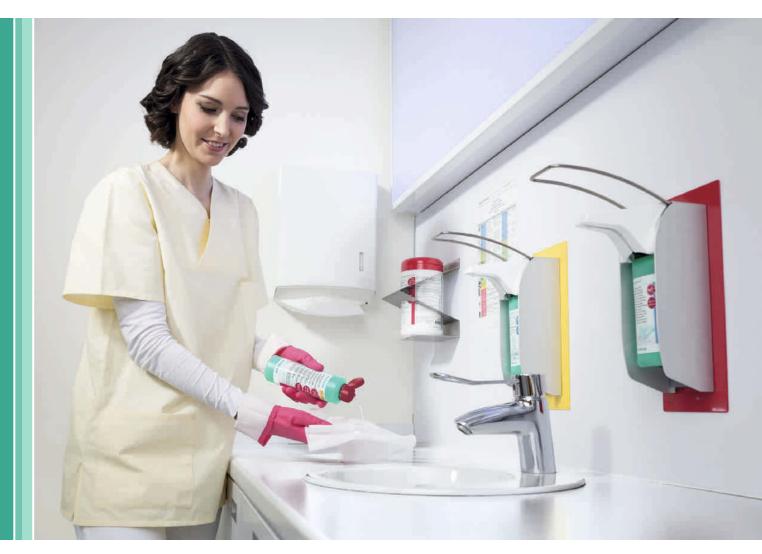

Hygiene





Meliseptol® – alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel ohne Zusatzwirkstoffe

Eigenschaften

- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Neue Rezeptur mit breitem Wirkungsspektrum und kürzerer Einwirkzeit
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren
- Ohne zusätzliche Wirkstoffe wie z. B. QAV, Amine oder Aldehyde
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



Meliseptol® auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® prüfen.

Lieferform	ArtNr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	19763	10966123
250 ml-Dosierflasche	19762	10966146
1000 ml-Handsprühflasche*	19764	10966152
1000 ml-Flasche	19761	10966169
5 Liter-Kanister	19758	10966175
Sprühkopf für 1000 ml-Flasche	6510094	02182034
Auslaufhahn 5 Liter-Kanister	3908208	03393968

^{*} Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen

Physikalisch-chemische Daten Aussehen: klare Flüssigkeit

Geruch: angenehm
Flammpunkt: +23 °C ± 1 °C nach DIN 51755

Dichte: ca. 0,93 g/ml

Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.





Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH	
bakterizid/levurozid	1 Min.*
tuberkulozid	1 Min.
mykobakterizid	1 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	30 Sek.
Rotaviren	30 Sek.
Adenoviren	30 Sek.
Noroviren**	30 Sek.

Der kürzestmögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.
 ** Surrogatvirus MNV

Meliseptol® – Auszug aus den Produktinformationen

100 g enthalten: Ethanol 44,0 g. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% amphotere Tenside, Parfum. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Dampf vermeiden. Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Schutzhandschuhen vor. Ausbringung max. 50 ml/m².