

AlproJet-Serie

Gebrauchsempfehlung

Reinigung und Desinfektion von zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen


AlproJet-DD

AlproJet-DD (D = daily) wird **2 %ig** angewendet und ist für die tägliche alkalische Reinigung, Desinfektion und Pflege (u. a. Speichel, Säuren) aller zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen ausgelegt. AlproJet-DD sollte **2 x täglich (mittags und abends)** eingesetzt werden



Anwendungsbeschreibung für 2 L Gebrauchslösung:

Dosierkammerverschluss öffnen, die Dosierflasche drücken, bis die Dosierkammer zur „20 ml“-Marke gefüllt ist.

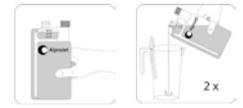

Anwendung:

Mit Hilfe der Dosierflasche **1 x 40 ml dosieren** und im **AlproJet MixCup** mit **40 - 50 °C warmem Wasser zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen**.



Saugschläuche auf die Ansätze des AlproJet MixCup aufstecken, **Spraynebelsauger auf den Ansatz mit der großen Öffnung** und den **Speichelsauger auf den Ansatz mit der kleinen Öffnung** des AlproJet MixCups stecken. Durch die unterschiedlichen Schlauchlängen im AlproJet MixCup erhält der Speichelsauger zusätzlich 200 ml, dies verbessert das Reinigungsergebnis im Speichelsauger.



Danach **bleibt 1 L Gebrauchslösung im AlproJet MixCup**. Die verbleibende Lösung im AlproJet MixCup schluckweise in die Speischale geben und einwirken lassen. **Erst vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen** (sowohl Speischale als auch die Saugschläuche), um noch nachträglich gelöste Rückstände herauszuspülen.



AlproJet-D

AlproJet-D 5 %ig ist für das tägliche alkalische Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Pflegen (u. a. Speichel, Säuren) aller zahnärztlichen Absauganlagen ausgelegt. AlproJet-D sollte **2 x täglich (mittags und abends)** eingesetzt werden.



Anwendung:

Bei **AlproJet-D** werden 50 ml pro 1 L Gebrauchslösung benötigt. Auch hier mit Hilfe der **AlproJet-D - Dosierflasche 2 x 50 ml dosieren** und im AlproJet MixCup **mit 40 - 50 °C warmem Wasser zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen**. Handhabung siehe AlproJet-DD.



AlproJet-W

AlproJet-W (W = weekly) ist ein **Spezialpräparat** und wird als **5 - 10 %ige** Gebrauchslösung eingesetzt. AlproJet-W wird als saures Kontrareinigungspräparat **an 2 Tagen in der Woche anstelle von AlproJet-D oder AlproJet-DD** angewandt. Die Anwendung sollte auch hier **2 x täglich (mittags und abends)** erfolgen. AlproJet-W ist vorwiegend **zum Lösen von Protein und Inkrustierungen aus Kalk** konzipiert. Das bei chirurgischen Arbeiten anfallende Blut kann somit leichter aus Abscheide- und Zentrifugensystemen in den Abfluss geleitet werden.



Gebrauchsempfehlung bei besonderen Anwendungen:

Z. B. vor einer chirurgischen Arbeit (wegen möglicher Schaumbildung durch Blut und Wasserstoffperoxid) **1 L kalte AlproJet-W-Lösung 5 %ig über die Schläuche in das System saugen**.

Ablagerungen werden verhindert, Wasserstoffperoxid im Auffangbehälter neutralisiert und die Schaumentwicklung reduziert. **In diesem Fall sollte AlproJet-W mit kaltem Wasser angemischt werden.**

Bei starker Verschmutzung bzw. bereits koaguliertes Blut eine **50 - 60 °C warme AlproJet-W-Lösung 10 %ig** anwenden.

Resultat:

Der **Lösungsvorgang** wird **beschleunigt**, **Rückstände** werden **pumpengängig** und somit **leichter abtransportiert**.

AlproJet-Serie

weitere Gebrauchsempfehlung bei besonderen Anwendungen:

Bei Prophylaxebehandlungen mit Pulverstrahl-Geräten:

Bei einigen Pulversorten auf Basis Natrium-/Kalziumbicarbonat und div. Polierpasten kann es zu Inkrustierungen, Schaumbildung (Tenside/Emulgatoren) wie auch zu Saugaussetzern kommen. Diese Probleme können durch nachfolgende Anwendungshinweise vermieden werden.



Lösung:

Vor der Behandlung eine 10 %ige kalte AlproJet-W-Lösung (1 L) in das Absaugsystem einsaugen.

Resultat:

Die schäumenden Rückstände werden **neutralisiert/beseitigt** und Saugaussetzer verhindert.

Grundreinigung mit AlproJet-W:

3 – 5 L AlproJet-W 10 %ige Anwenderkonzentration. Lösung absaugen,
1 – 2 Std. einwirken lassen und mit 50 °C heißem Wasser nachspülen.

Resultat:

Der Lösungsvorgang wird **beschleunigt**, Rückstände werden **pumpengängig** und somit **leichter abtransportiert**.

weitere Gebrauchsempfehlungen:

Amalgamabscheider, Einzelplatz:

Je nach Arbeitsweise **2 x wöchentlich AlproJet-W (Montag und Dienstag)** und **3 x wöchentlich AlproJet-DD/AlproJet-D (Mittwoch bis Freitag)** verwenden. Bei hohem Proteineintrag kann auch **3 x wöchentlich mit AlproJet-W** gearbeitet werden und **2 x wöchentlich mit AlproJet-D/AlproJet-DD**.



Zentrale Amalgamabscheider und Separationssysteme:

Bei zentralen Nassabsaugsystemen (lange Abflusswege) **AlproJet-DD/AlproJet-D + AlproJet-W** im wöchentlichen Wechsel **2 x tägl. (mittags und abends)** anwenden.

Einwirkzeit: mindestens 30 Minuten! (Am Besten in der Mittagszeit oder über Nacht)

Erst **vor Arbeitsbeginn (morgens oder nach der Mittagszeit)** Saugschläuche und Speischale **gut mit Wasser nachspülen** (z. B. mehrmaliges Betätigen der Speischalenspülung).

Durch die ausgezeichnete Materialverträglichkeit wird das komplette System auch bei langen Einwirkzeiten nicht geschädigt! Dies wird durch regelmäßige neutrale Untersuchungen immer wieder bestätigt (u. a. von Dentsply Sirona).

Diverse Gutachten und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung!

Grundsätzliche Anwendungsempfehlungen:

Amalgamabscheider, Einzelplatz:

Nach jeder Behandlung am Patienten:

1 – 2 Becher kaltes Wasser absaugen, Speischalenspülung 30 sec. betätigen (ca. 0,5 – 1 L)!



made
in
Germany

Sicher. Sauber. **ALPRO.**

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstraße 9 • 78112 St. Georgen • Germany
Tel.: +49 77 25 93 92-0 • Fax: +49 77 25 93 92-91 • www.alpro-medical.com • info@alpro-medical.de

ALPRO[®]
ALPRO MEDICAL GMBH

© ALPRO MEDICAL 07/2019 • REF 80350008