

simplee

SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen.
Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gebiss-Modellen.

Stand: 150720

Inhalt: **20 kg**

■ **REF** 700 918 weiß

■ **REF** 700 919 blau

Anmischverhältnis:	100 g: 30 ml dest. Wasser
Anmischzeiten:	manuell 60 Sekunden Vakuum 30 Sekunden
Verarbeitungszeit:	4 - 5 Minuten
Abbindezeit:	9:30 - 10:30 Minuten
Entformbarkeit:	ca. 20 Minuten
Druckfestigkeit nach 1h:	40 MPa
Expansion nach 2h:	0,10%
Expansion nach 24h:	0,15%

Vertrieb durch Müller & Weygandt GmbH – Reichardsweide 40 – 63654 Büdingen – Tel.:+0049(0)6042 – 88 00 88