



MICRO-ISOLAT NF

Stand:01/04/17

REF 000 930

Inhalt: e 1 Liter

Arbeitsanleitung:


Nach dem Ausbrühen des Gipsmodells erfolgt der Auftrag des Kunststofftrennmittels auf die handwarme, aber nicht mehr dampfende Oberfläche.

Bei Bedarf kann eine zweite Schicht nach dem Trocknen der ersten aufgetragen werden. Bei Heißluftpolymerisation besonders reichlich isolieren.

Haltbarkeit bis 1 Jahr nach Öffnen.

Empfehlung: Pinsel nicht direkt in die Flasche eintauchen.

LOT

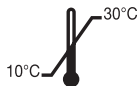

M+W Dental

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • 63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88