

Gebrauchsfertige provisorische Einkomponenten-Verschlussmasse



Abb. 1

Anwendungsbereiche

Provisorischer kurzzeitiger Verschluss von Zahnkavitäten.

Applikation

Die benötigte Menge Fermin mit Füllinstrument entnehmen und direkt in die Kavität (feucht oder trocken) einbringen (Abb. 1); erhärtet nach ca. 15 Minuten unter Speichелеinfluss, ca. 1 Stunde vor Kaudruck schonen.

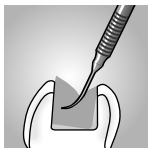


Abb. 2

Entfernung des Provisoriums

Nach Abschluss der provisorischen Behandlung Fermin mit Sonde oder Exkavator entfernen (Abb. 2).

Kontraindikationen

Fermin darf nicht direkt auf die Pulpa gelegt werden.

Hinweis

- Nach dem Füllen ohne geeigneten Pulpa-, Dentenschutz, insbesondere bei fehlender Unterfüllung in tiefen Kavitäten, können Irritationen der Pulpa auftreten.
- Nur für die angegebene Zweckbestimmung durch geschultes Fachpersonal.

Aufbewahrung

Dicht verschlossen nicht über 25 °C lagern.