



SYNTH-STONE

Stand: 27/09/17

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen, z. B. Sägemodelle, Meistermodelle und Modelle für die Modellgussprothetik. Synth-Stone garantiert glatte, kratzfeste Oberflächen, harte und kantenstabile Modelle und eine minimale Expansion.

Inhalt: **5 kg**

REF 093 932 braun

Inhalt: **20 kg**

REF 093 926 braun

Verarbeitung:

Mischverhältnis

Synth-Stone : dest. Wasser: 100 g : 23 ml

Verarbeitungstemperatur: 23 °C

Pulver in das vorgelegte Wasser einstreuen.

Verarbeitungszeit: 4-5 Min.

Mischdauer mechanisch unter Vakuum: 30 Sek.

Mischdauer manuell: 60 Sek.

Physikalische Daten:

Erstarrungsende: 10-12 Min.

Druckfestigkeit nach 24 Std.: über 50 N/mm²

Lineare Abbindeexpansion
nach 2 Std.: ca. 0,10 %

MW Dental

Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40 • D-63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88