

# NUPRO®

## PROPHYLAXEPASTE

Mit NovaMin®

**Vorsicht: Dieses Produkt darf nur an zugelassene Zahnärzte verkauft werden.**

**Diese Anweisungen gelten für alle Geschmacksrichtungen und Putzkörper-Stärken von NUPRO Sensodyne.**

NUPRO Sensodyne ist eine hochwertige Prophylaxepaste mit NovaMin®, ein Kalzium-Natrium-Phosphosilikat. Die farbstofffreien Rezepturen zur sanften Entfernung der Zahnbeläge und der Verfärbungen sind in den folgenden zwei Putzkörper-Stärken verfügbar: In fluorid- und nicht-fluoridhaltiger Rezeptur erhältlich.

### Feinkörnig (POLISH)

Optimal für jüngere Patienten sowie Prophylaxe mit minimalem Zahnverschleiß.

### Grobkörnig (STAIN REMOVAL)

Geeignet für die meisten Putzvorgänge zur Entfernung von Verfärbungen und Wiedererhaltung des Glanzes.

## GEBRAUCHSINDIKATIONEN

NUPRO® Sensodyne® Prophylaxe-Paste mit NovaMin® dient zum Reinigen und Polieren vor und nach der Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung im Rahmen einer professionellen Prophylaxe-Behandlung. Des Weiteren kann NUPRO® Sensodyne® Prophylaxe-Paste mit NovaMin® zur sofortigen Linderung von Zahnempfindlichkeit und zur dauerhaften Empfindlichkeitsminderung für bis zu 4 Wochen (28 Tage) nach nur einer Anwendung verwendet werden.

## KONTRAINDIKATIONEN

- Nicht verwenden bei Patienten mit Allergie gegen irgendeinen der Bestandteile.
- Nicht verwenden bei Restaurationen. Verwenden Sie für Restaurationen bitte die NUPRO® Shimmer®-Politurpaste.

## INHALTSSTOFFE

Medizinische Inhaltsstoffe: 2,72% Natriumfluorid (1,23 % Fluoridion) (Nur für fluoridhaltige Pasten)

Nicht-medizinische Inhaltsstoffe (Für alle Pasten): Glycerin, Bims, 15% Kalzium-Natrium-Phosphosilikat (NovaMin®), Natriumsilikat, Titandioxid, Methylsalicylat, aufbereitetes Wasser, Natrium-Carboxymethylcellulose, Natrium-Saccharin, Geschmacksstoffe.

## WARNHINWEISE

- Nur für fluoridhaltige Pasten, übermäßige Einnahme von Fluorid kann Brechreiz verursachen. Deshalb müssen die Pasten ausgespuckt und dürfen nicht heruntergeschluckt werden.
- Kann bei Kontakt Augenreizung verursachen. Bei erfolgtem Kontakt die Augen sofort gründlich 15 Minuten lang ausspülen. Bei anhaltender Reizung wenden Sie sich an einen Arzt.
- Vermeiden Sie häufigeren Hautkontakt da dieser Dermatitis verursachen kann. Bei erfolgtem unbeabsichtigtem Hautkontakt, waschen Sie die betroffenen Hautabschnitte gründlich mit Wasser und Seife.
- Aufnahme von Prophylaxepaste kann Speichelabsonderung, Brechreiz und Erbrechen verursachen. Aufnahme größerer Mengen kann Bauchschmerzen, Schwäche, Tremor (Zittern), Krämpfe oder Konvulsionen (Zuckungen) verursachen. Tod kann auftreten infolge von Atemlähmung. Bei erfolgter unbeabsichtigter Aufnahme größerer Mengen, rufen Sie sofort einen Arzt. Verabreichen Sie umgehend größere Mengen Milch oder Wasser (falls keine Milch verfügbar).
- Die Kapselbecher enthalten ausreichend Prophylaxepaste für eine einzelne Anwendung. Jeder Kapselbecher darf nur einmal und nur bei einem einzelnen Patienten verwendet werden. Erneute Verwendung der Reste einer Kapsel kann zu Kreuzkontamination (Verunreinigung) führen.

# SENSODYNE®

## DEUTSCH

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Fluorid enthaltende Prophylaxepasten sind kein Ersatz für andere Formen der Fluoridbehandlung.
- Prophylaxepasten dürfen nur von Personen verwendet werden, die über die professionelle Ausbildung zur Durchführung dentalprophylaktischer Maßnahmen verfügen.
- Während der Verwendung müssen Schutzbrillen und -Handschuhe getragen werden.

## NEBENWIRKUNGEN

Nur für fluoridhaltige Pasten, folgende Nebenwirkungen können bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegenüber Fluoriden auftreten: Hautausschlag, atopische Dermatitis, Nesselfieber, Magenverstimmung, Kopfschmerzen und Schwäche.

## SCHRITTWEISE ANWENDUNG

Bei der Verwendung der Töpfe mit Paste ist die für eine Anwendung ausreichende Menge zu entnehmen und in ein sauberes Dappenglas oder einen anderen geeigneten Behälter umzufüllen.

Die Kapselbecher enthalten ausreichend Prophylaxepaste für eine einzelne Anwendung. Jeder Kapselbecher darf nur einmal und nur bei einem einzelnen Patienten verwendet werden. Erneute Verwendung der Reste einer Kapsel kann zu Kreuzkontamination (Verunreinigung) führen.

Nehmen Sie einen angewinkelten Einweg-Applikator, wie z.B. NUPRO® revolv® Disposable Prophy Angle oder einen klassischen angewinkelten Applikator aus Metall und füllen Sie den Becher auf, indem Sie den Applikator langsam in die Paste hineindrücken.

Paste auftragen und 60 Sekunden lang einwirken lassen. Während des Vorgangs soll stets eine ausreichende Menge von Paste im Becher sein, um Überhitzung der Zahnoberfläche zu vermeiden. Speichelabsaugung wird empfohlen, um übermäßige Verdünnung und Herunterschlucken der Paste zu vermeiden.

Spülen Sie den gesamten Mundbereich mit fließendem Wasser aus. Bei weißen Rückständen nach dem normalen Spülen den Patienten den Zahnfleischbereich intensiv mit Wasser oder Mundspülmittel spülen lassen. Polieren vor der Zahnsteinentfernung ist ebenfalls eine Möglichkeit, die weißen Rückstände auf dem Zahnfleisch zu reduzieren.

## AUFBEWAHRUNG

Bei der Verwendung der Töpfe mit Paste muß der Deckel sofort nach dem Gebrauch verschlossen werden, um Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden. Bei maximal 25 °C (77 °F) lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



## VERFALLSDATUM UND CHARGENNUMMER

Bei jeglicher Korrespondenz sollen zur Identifizierung des Produkts die Artikelnummer, die Chargennummer und das Verfallsdatum angegeben werden. Nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Kann auf unserer Website, unter [www.professional.dentsply.com](http://www.professional.dentsply.com), via e-Mail an [ProfessionalMSDS@DENTSPLY.com](mailto:ProfessionalMSDS@DENTSPLY.com), oder von unserem Kundendienst, unter +1-800-989-8826 erhalten werden.

Sensodyne®, NovaMin® und die Ringe sind registrierte Warenzeichen der GlaxoSmithKline® Unternehmensgruppe.